

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

ACIONADOR ELÉTRICO



www.blueequipamentos.com.br

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Figura 1

- Desligue o Registro da Água
- Retire a torneira
- Rosqueie o acionador no cano 3/4" (lado azul)
- Rosqueie a torneira no lado branco 1/2"
- Verifique a Voltagem 110V ou 220V
- Ligue na tomada
- Acione o pedal (pisar)

- Figura 2

- Desligue o Registro da Água
- Retire o engate (mangueira)
- Rosqueie o acionador no cano 3/4" (lado azul) na entrada da rede

de água

- Rosqueie a ponta do engate (mangueira) no lado branco 1/2"
- Verifique a Voltagem 110V ou 220V
- Ligue na tomada
- Acione o pedal (pisar)

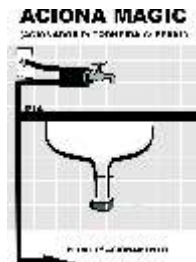


Figura 1

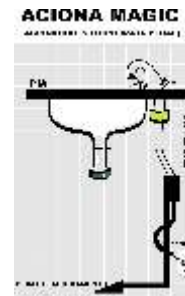


Figura 2

Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos

Blue Equipamentos
Odontológicos e Médicos Ltda.
CNPJ: 04992788/0001-10
Visite nosso site:
<http://www.blueequipamentos.com.br>
Rua Fernando M. Pierre, 350
JD. Primavera - CEP 15.061-480
São José do Rio Preto - SP - BR

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”