

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

## ELIMINADOR DE BOLHAS ( PANELAS DE ORTO ) “ Nº 1, Nº 2 E Nº 3 ”



[www.blueequipamentos.com.br](http://www.blueequipamentos.com.br)

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A utilização do **Eliminador de Bolhas** é simples e prático, pois basta adicionar água até cobrir o modelo e inserir 35 libras de ar comprimido (máximo), utilizando o bico injetor localizado na tampa ao lado do Manômetro.

Pode ser utilizado somente com água, basta colocar o modelo e preencher totalmente o reservatório com água. Aperte os manípulos e observe a pressão do manômetro. Neste caso não inserir ar comprimido.

De 20 a 30 minutos, o trabalho estará polimerizado e livre de bolhas.

Para abrir a tampa, retire a pressão (apertando o pino que esta dentro do bico injetor) até que o Manômetro indique pressão zero.

**Atenção:**

- NÃO INJETE MAIS QUE 35 LIBRAS, POIS HAVERÁ RISCO DE EXPLOÇÃO DA TAMPA**
- Não vai ao fogo.**
- Retire a pressão antes de abrir a tampa.**
- Utilize somente acrílico auto-polimerizável.**
- Certifique-se que a borracha de vedação esteja na canaleta.**
- Aperte bem os Manípulos (borboleta).**

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Nº 1	Nº 2	Nº 3
A	6x11 cm	7,5x13 cm	9x15,5 cm
B	500 ml	1000 ml	1500 ml
C	950 g	1500 g	1900 g

A - Reservatório B - Capacidade C - Peso

Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos

Blue Equipamentos  
Odontológicos e Médicos Ltda.  
CNPJ: 04992788/0001-10  
Visite nosso site:  
<http://www.blueequipamentos.com.br>  
Rua Fernando M. Pierre, 350  
JD. Primavera - CEP 15.061-480  
São José do Rio Preto - SP - BR

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”