

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

MOTOR DE POLIMENTO 2 VELOCIDADES (ALTA E BAIXA)



www.blueequipamentos.com.br

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- O **Motor de Polimento de 2 (duas) Velocidades**, possui três ponteiras, sendo duas para polimento e uma tipo mandril, uma chave allen e quatro pés de borracha.
- Retire o suporte de madeira substituindo pelos quatro pés de borracha.
- Coloque a ponteira desejada apertando o parafuso com a chave allen.
- Ligue na tomada verificando se sua rede elétrica está compatível com a do equipamento (110v ou 220v).
- Em baixa rotação empurre o pino para um lado ou se desejar em alta, empurre para o outro lado. Para desligar volte o pino na posição inicial.

Observações:

- Motor de 2 velocidades com ventilação, o que aumenta o tempo útil do motor.
- Sistema de aperto de ponteiras para sua melhor aderência.
- Pintura de alta resistência.
- Construído com fio cobre.
- 3 ponteiras: duas cônicas para escova e um para pedra (esmeril).
- * duas ponteiras cônicas pois, uma para o lado direito e outra lado esquerdo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor	Monofásico
Dimensão	385x145x195 mm
Potência	1/2 CV
Frequência	60 Hz
Carçaça	NEMA 48
Peso	9,3 kg
Voltagem	110V ou 220V
Alta Rotação	3.480 RPM
Baixa Rotação	1.700 RPM

Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos

Blue Equipamentos
Odontológicos e Médicos Ltda.
CNPJ: 04992788/0001-10
Visite nosso site:
<http://www.blueequipamentos.com.br>
Rua Fernando M. Pierre, 350
JD. Primavera - CEP 15.061-480
São José do Rio Preto - SP - BR

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”