

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

## PLASTIFICADORA ODONTO-BUCAL “COM VÁCUO PRÓPRIO”



[www.blueequipamentos.com.br](http://www.blueequipamentos.com.br)

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A **Plastificadora Odonto-Bucal “com vácuo próprio”** não necessita de instalação, pois basta ligá-la na tomada verificando se sua rede elétrica está compatível com a do equipamento ( 110v ou 220v).
- Abra o suporte da placa girando o cabo frontal preto para esquerda .
- Coloque a placa de acordo com sua necessidade girando o cabo para direita.
- Suba o suporte, até o risco duplo, para placas de silicone (soft) independente da espessura, e para placas rígidas (cristal) no nível do risco único, evitando assim possível formação de bolhas.
- Aperte o botão vermelho para iniciar o aquecimento.
- Para efetuar a plastificação abaixo o suporte até iniciar o processo de sucção automático.
- Aperte o botão vermelho novamente ( luz apagará ) para desligar o aquecimento e a sucção.
- Espere a sucção parar por completo, suba e gire para o lado o suporte pelos cabos pretos deixando a placa esfriar.
- Abra o suporte, como descrito acima e retire com cuidado a placa moldada.
- Caso o suporte da placa não fixe nos riscos único e duplo, aperte o parafuso localizado dentro do cabo traseiro com a chave allen que acompanha o produto
- Se após esta operação o problema persistir, entre em contato com a Blue Equipamentos no (17) 3215 3800 de segunda a sexta-feira das 8:00h as 18:00h, horário de Brasília.
- Registre seu produto pelo email: [blue@blueequipamentos.com.br](mailto:blue@blueequipamentos.com.br) e conheça vantagens em ter adquirido.

**SOLICITE PLACAS DA BLU COM REGISTRO DA ANVISA**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	Motor - 950 W Resistência - 450 W	<b>Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos</b>
Rotação	18.500 RPM	
Peso	2,9 kg	<b>Blue Equipamentos Odontológicos e Médicos Ltda. CNPJ: 04992788/0001-10 Visite nosso site: <a href="http://www.blueequipamentos.com.br">http://www.blueequipamentos.com.br</a> Rua Fernando M. Pierre, 350 JD. Primavera - CEP 15.061-480 São José do Rio Preto - SP - BR</b>
Altura	29 cm	
Frequência	50/60 Hz	
Voltagem	110v ou 220v	

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”