

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

PLASTIFICADORA ODONTO-BUCAL “PNEUMÁTICA”



www.blueequipamentos.com.br

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A instalação da **Plastificadora Odonto-Bucal “pneumática”** é simples, você mesmo poderá fazer.
- Encontre a mangueira de ar (compressor) que forneça de 90 à 110 libras.
- Faça a conexão da mangueira da **Plastificadora “pneumática”** antes do equipo para garantir a pressão necessária. Corte a mangueira que vai para o equipo e conecte o “T” (conexão para mangueira padrão odontológico), sobrando uma ponta que será conectada a mangueira da Plastificadora Pneumática.
- Ligue na tomada verificando se sua rede elétrica está compatível com a do equipamento (110v ou 220v).
- A mangueira cristal que acompanha a **Plastificadora Odonto-Bucal “pneumática”** (para teste e demonstração) deverá ser substituída por mangueira de alta pressão (odontológica).
- Se não estiver fazendo sucção perfeita, verifique se a pressão está entre 90 e 110 libras. Se a pressão estiver correta, pode ter entrado sujeira no sistema de ar. Para eliminar esta sujeira, basta limpar a saída de ar, com um leve jato de ar, pois haverá então, um retrocesso do ar, eliminando a sujeira.
- Abra o suporte da placa girando o cabo frontal preto para esquerda e coloque a placa de acordo com sua necessidade girando o cabo para direita.
- Suba o suporte, até parar no furo para placas de silicone (soft) independente da espessura, e para placas rígidas (cristal) um pouco abaixo do furo, evitando assim possível formação de bolhas.
- Aperte o botão vermelho para iniciar o aquecimento e efetue a plastificação abaixando o suporte até iniciar o processo de sucção pneumático automático.
- Aperte o botão vermelho novamente (luz apagará) para desligar o aquecimento. Suba e gire para o lado o suporte pelos cabos pretos deixando a placa esfriar.
- Abra o suporte, como descrito acima e retire com cuidado a placa moldada.
- Caso o suporte da placa não fixe no furo, aperte o parafuso localizado ao lado do suporte com a chave allen que acompanha o produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-------------|--------------|
| Resistência | 450 W |
| Peso | 2,5 kg |
| Altura | 20 cm |
| Voltagem | 110v ou 220v |

Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos

Blue Equipamentos
Odontológicos e Médicos Ltda.
CNPJ: 04992788/0001-10
Visite nosso site:
<http://www.blueequipamentos.com.br>
Rua Fernando M. Pierre, 350
JD. Primavera - CEP 15.061-480
São José do Rio Preto - SP - BR

SOLICITE PLACAS DA BLUE
COM REGISTRO DA ANVISA

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”