

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

POLIDORA QUÍMICA E PLASTIFICADORA DE GODIVA



www.blueequipamentos.com.br

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A **Polidora Química e Plastificadora de Godiva** não necessita de instalação, pois basta ajustar a chave seletora de voltagem de acordo com a corrente elétrica de seu consultório, localizada na parte inferior do equipamento (110v ou 220v).

- Aqueça a polidora girando o botão até o indicador de temperatura máxima, e então a lâmpada vermelha se acenderá.

- Coloque no reservatório líquido suficiente para polir o aparelho e leve-a para polidora e aguarde de 5 a 10 minutos (este tempo pode variar de acordo com a quantidade de líquido e a temperatura ambiente).

- Observe a formação de pequenas bolhas e a visualização de vapor, indicando que o líquido está em temperatura suficiente para o polimento.

- Mergulhe o aparelho dentro do reservatório com o auxílio de uma pinça, no máximo 10 segundos.

- Retire o aparelho do reservatório e deixe escorrer o excesso de líquido, repousando por 10 minutos. E o trabalho de polimerização estará pronto. A polidora manterá temperatura do líquido de polimento pelo tempo necessário para serem feitos mais de um polimento por processo.

- Para utilização da Plastificadora de Godiva faça o mesmo procedimento da Polidora, sem o reservatório de alumínio, e despeje água no segundo reservatório (branco).

Atenção:

- Não usar resinas que contenham **Cross - Link**.

- Líquido corrosivo e altamente inflamável em alta temperatura.

- Utilize a tampa para o aquecimento rápido dos líquidos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	A	B
Altura	15,5 cm	4 cm
Diâmetro	15 cm	10 cm
Peso	800g	250 ml
Capacidade		

A - Equipamento.

B - Reservatório.

Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos

Blue Equipamentos
Odontológicos e Médicos Ltda.
CNPJ: 04992788/0001-10

Visite nosso site:
<http://www.blueequipamentos.com.br>

Rua Fernando M. Pierre, 350
JD, Primavera - CEP 15.061-480
São José do Rio Preto - SP - BR

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”