

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

## \* “RECORTADOR DE GESSO COM MESA ANGULADA”

## \*\* “MINI RECORTADOR DE GESSO”



[www.blueequipamentos.com.br](http://www.blueequipamentos.com.br)

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A instalação dos **Recortadores de Gesso** são simples, você mesmo poderá fazer:

- Conecte a mangueira de entrada de água no conector que se encontra na tampa vertical no caso do Recortador c/ mesa angulada. Já o Mini Recortador, o conector encontra-se na tampa horizontal na parte superior.

- A outra mangueira serve para saída de água que se acumula dentro do Recortador, direcione essa mangueira para a pia ou local próprio.

### Observações:

- Em baixo dos Recortadores encontra-se uma chave seletora de voltagem que deve ser alterada conforme a voltagem correta do local (110 ou 220 V). Verifique antes de ligá-lo.

- Com o uso poderá ocorrer um desgaste normal do disco, que facilmente poderá ser trocado, comprando disco conforme especificação técnica ou fazer pedido à **Blue Equipamentos Odontológicos e Médicos Ltda.**

- Regular a entrada de água para o mínimo possível, somente para não levantar poeira do gesso.

- Após o uso deixar escorrer água por algum tempo até sair água limpa, evitando assim o acúmulo de resíduos de gesso no recortador.

- Ao retirar a tampa superior para a troca do disco, assegure-se de que a tampa esteja devidamente vedada para que não escorra água.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	A	B
Potência	1/4 HP	1/3 HP
Corrente	127 V - 7 A 220 V - 3 A	127 V - 3,5 A 220 V - 1,3 A
Capacitor	193 uF/110 VCA	8,5 uF/250 VCA
Rotação	1.740 RPM	1.750 RPM
Peso	11 Kg	5,6 Kg
Altura	330 mm	210 mm
Frequências	50/60 Hz	50/60 Hz
Disco reforçado com fibra de vidro	CRS-15 - ICDER 254 x 15,9 x 4,7 mm 10" Polegadas	CRS - 14 - GRANITEIRO 177,8 x 22,2 x 4,7 mm 7" Polegadas
Mangueira (entrada)	1/2" Polegada	1/4" Polegada
Mangueira (saída)	1" Polegada	1/2" Polegada
Vedação da Tampa	Borracha	Massa de calafetação (espaguetti)

A - Recortador de Gesso com mesa angulada.

B - Mini Recortador de Gesso.

Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos

Blue Equipamentos  
Odontológicos e Médicos Ltda.  
CNPJ: 04992788/0001-10  
Visite nosso site:  
<http://www.blueequipamentos.com.br>  
Rua Fernando M. Pierre, 350  
JD. Primavera - CEP 15.061-480  
São José do Rio Preto - SP - BR

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”