

SELADORA COM SUPORTE



www.blueequipamentos.com.br

- A **Seladora** não necessita de instalação, pois basta ligá-la na tomada verificando se sua rede elétrica está compatível com a do equipamento (110v ou 220v).

- Ligue, apertando o interruptor, aguarde **8 a 10 minutos** para que o equipamento atinja a temperatura ideal de selagem.

- Encaixe o suporte da bobina no fundo da seladora, apertando as porcas tipo borboleta junto ao parafuso.

- Para o processo de selagem determine o tamanho para acomodar o material a ser embalado e pressione abaixando a base superior por **5 segundos**. Repita o mesmo procedimento acima para selagem da outra extremidade.

Atenção:

- Durante os intervalos de trabalho, quando o equipamento não for utilizado por um período de 30 minutos, desligue-o para que não haja superaquecimento e desperdício de energia.

- Utilize sempre a embalagem com a face de papel grau cirúrgico para baixo, deixando a face do filme para cima para não aderir a base inferior (inox).

- Lubrifique periodicamente as molas com vaselina líquida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMP./LARG./ALT.	350x170x145
ÁREA SELAGEM	250 mm
EXPESSURA SOLDA	13mm
VOLTAGEM	110v ou 220v
PESO	1400g

Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos

Blue Equipamentos
Odontológicos e Médicos Ltda.
CNPJ: 04992788/0001-10
Visite nosso site:
<http://www.blueequipamentos.com.br>
Rua Fernando M. Pierre, 350
JD. Primavera - CEP 15.061-480
São José do Rio Preto - SP - BR