

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

SOLDA PONTO



www.blueequipamentos.com.br

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A **Solda Ponto** não necessita de instalação, ligue a tomada e verifique se a voltagem da rede é a mesma selecionada no equipamento (110 ou 220 volts).

- SOLDAGEM EM LÂMINAS (bandas)

Prenda a lâmina entre o elétrodo superior pontiagudo e o inferior ponta chata, posicione a chave seletora no 1 ou 2, conforme a espessura do material a ser soldado, com um toque rápido acione o botão.

- SOLDAGEM EM TUBOS E BRACKETS*

Prenda o material a ser soldado entre os mesmos elétrodo descritos acima, posicionando a chave seletora no 3, 4 ou 5, conforme a espessura do material a ser soldado, com um toque rápido acione o botão.

P.S.: Se necessário mais um ponto de solda, mude a posição do material, de modo, que o próximo ponto não esteja em cima do primeiro.

- TRATAMENTO TÉRMICO EM FIOS (REVESTIMENTO)

1. Solte as duas borboletas (porcas) que estão sobre o suporte, na parte de cima do aparelho. 2. Ajuste as pontas do arco entre a parte fixa do suporte e a móvel, fazendo com que cada ponta do arco fique de um lado, dentro do suporte montado. 3. Aperte as borboletas de forma que prendam o arco na peça. 4. Abaixar a mesa evitando que os elétrodo tenham contato entre si, posicione a chave seletora no 3 e aperte o botão.

ACOMPANHA

- Dois Eletrodos (Cobre-Cromo-Zircônio).
- Chave Allen.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões A/L/C	13cm 14cm 20cm
Peso	2,9 kg
Voltagem	Bivolt 110v/220v
Frequência	50 a 60hz

Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos

Blue Equipamentos
Odontológicos e Médicos Ltda.
CNPJ: 04992788/0001-10
Visite nosso site:
<http://www.blueequipamentos.com.br>
Rua Fernando M. Pierre, 350
JD. Primavera - CEP 15.061-480
São José do Rio Preto - SP - BR

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”