

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

VIBRADOR DE GESSO



www.blueequipamentos.com.br

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A instalação dos **Vibrador de Gesso** são simples, você mesmo poderá fazer:

- No fundo do Vibrador de Gesso encontra-se uma chave seletora de voltagem que deve ser alterada conforme a voltagem correta do local (110 ou 220 V). Verifique antes de ligá-lo.

- Para ligar gire o dimmer da velocidade ou frequência de vibração escolhendo a melhor opção de potência.

- Para desligar gire ao contrário (Anti-horário) até verificar o total desligamento do aparelho.

Observações:

- Bandeja emborrachada e removível para limpeza.
- Apoio de bancada anti-derrapante com ventosas.
- Corpo em plástico e fundo em aço, de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, alcalinos ou detergentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequências	50/60 Hz
Corrente Bivolt	127 V - 7 A / 220 V - 3 A
Peso	1.370 Kg
Dimensão	110 x 140 x 150 mm

Caso não tenha assistência técnica em seu estado entre em contato com a blue equipamentos

Blue Equipamentos
Odontológicos e Médicos Ltda.
CNPJ: 04992788/0001-10
Visite nosso site:
<http://www.blueequipamentos.com.br>
Rua Fernando M. Pierre, 350
JD. Primavera - CEP 15.061-480
São José do Rio Preto - SP - BR

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”